

医療用
ウィッグ

取り扱い説明書

ANCS
アックス

オールウィッグ装着前の準備

脱毛前

下地ネットで自毛をまとめます。
抜け毛が落ちるのも予防します。

自毛が短い場合

短い髪用下地ネット(サポートネット)をかぶります。

自毛が長い場合

長い髪用下地ネット(ロングネット)で自毛をまとめます。

1

ネットのゴムの太い部分を下にして首とまで通しておきます。



2

ヘアバンドをつける要領でネットを生え際まで持ち上げます。



3

筒状にネットを伸ばして、自毛を頭の上で自然なふくらみになるようにまとめます。



4

自然なふくらみを確認してネットから耳を出します。生え際が1~2cm出るようにネットをずらし、ピンで留めます。



脱毛後

インナーキャップ(和紙コットンキャップ)で頭皮を保護します。

オールウィッグのつけ方

オールウィッグの
つけ方・お手入れ方法の
動画はこちら



1

ウィッグを軽くブラッシングします

※ストッパーを使用する場合は、つける前にストッパーを開けておきます。

2

ウィッグの位置を決めてかぶります

ウィッグのもみあげ部分を両手で持ち、額にかかるように深めにかぶります。そのあと、ウィッグを後ろにずらすように引きながら、えり足の位置をあわせませす。



※ストッパーを使用する場合は、位置が決まったらウィッグの上からストッパーの両端を押さえて閉じてください。

3

スタイルを整えます

スタイルを確認しながら、軽くブラシでなじませます。最後に手ぐしを入れるとより自然に仕上がります。



※ストッパーにより痒みや痛み、刺激等を感じる場合はストッパーを取り外すことも可能です。

ウィッグのお手入れ方法

いつでも快適にご使用いただくために、専用のヘアケア商品をお使いください。

1 準備

ウィッグの毛やベースネットはデリケートです。ストッパーが閉じていることを確認しウィッグ全体をブラシでとかし、ホコリや毛のもつれを取り除きます。



2 シャンプー

洗面器に水またはぬるま湯を入れ、専用クリーナーを適量加え泡立てます。ウィッグを約5分間浸し、水またはぬるま湯ですすぎます。



3 リンス

洗面器に水またはぬるま湯を入れ、専用リンスを適量加えて軽く混ぜます。ウィッグを約2分間浸し、水またはぬるま湯ですすぎます。



4 タオルドライ

乾いたタオルで押さえるように水分を取ります。決してこすったりしないようにしてください。タオルドライの後、専用ブラシでスタイルを整えてから自然乾燥します。



※専用クリーナーと専用リンスの使用量はボトル背面の【使用方法】をご参照ください。

※もみ洗いやこすり洗いはしないでください。過度のブラッシングは抜け毛、切れ毛、静電気発生の原因になります。

ご使用上の注意

火気にご注意ください。

ウィッグを火に近づけないでください。

ウィッグに引火し、火傷する危険があります。

異常な高温下となる環境は避けてください。

ストーブ・ヒーターの温風口近く、高温のドライヤーなどをお使いになりますと、ウィッグの毛やベースネットを傷めたり、スタイルのくずれ等の原因になることがあります。ドライヤーは30cm以上離してお使いください。

過度のブラッシングは避けてください。

ウィッグの毛やベースネットは非常にデリケートです。専用ブラシを使いネットに引っかけないようにご注意ください。ベースネットの裏側にウィッグの毛が出てしまった場合は、無理に戻そうとせず、店舗スタッフにご相談ください。

頭皮に異常を感じたら

頭皮に異常(傷・湿疹・腫れもの・炎症等)がある場合や、ただれ、かぶれ、痒み、刺激等の異常がみられた場合は、ご使用を中止し、専門の医師または店舗スタッフにご相談ください。

快適にお使い
いただくために

定期的なご来店を
おすすめします。

お問い合わせは
ご利用の
店舗まで

よくあるご質問

Q

ウィッグを洗う頻度はどのくらいですか？

A

毎日ご使用になる方は、1週間に1度が目安です。
汗をかいて気になる場合は、その日のうちにお洗いください。

Q

CT・MRI・X線検査を受ける時は？

A

検査内容や撮影する部位によって
ウィッグの装着可否が異なります。
装着の可否は医師または、病院へご相談ください。

Q

ウィッグのサイズ調整はできますか？

A

お客様の毛量の変化に合わせてサイズ調整いたします。
お気軽に店舗スタッフにご相談ください。
※ウィッグの状態によりお受けできない場合がございます。

Q

ウィッグのセットが崩れたらどうしたらいいの？

A

店舗にて、シャンプー、トリートメント、
スタイルセット等のサービスを1年間無料で承っております。
※MSショート、MMボブ、MM-04ミディアムは無料サービス対象外です。

Q

ケア商品はどこで購入できますか？

A

店舗またはWEBサイト（アートネイチャー・オンラインショップ）で
ご購入いただけます。外見の変化などをケアするアイテムも
ご用意しております。

※販売場所が変更になる場合がございます。

アートネイチャーの 医療用ウィッグ

0120-76-9012

お問い合わせ時間 AM9:00～PM6:00

アックス



私たちは、ピンクリボン運動を応援しています。



お客様からお預かりする個人情報は、当社の事業に関するお知らせ・ご連絡の為に利用いたします。詳しくは当社ホームページをご覧下さい。www.artnature.co.jp
〒151-0053 東京都渋谷区代々木 3-40-7 ANセンター



日本毛髪工業協同組合加盟 証券コード:7823

